
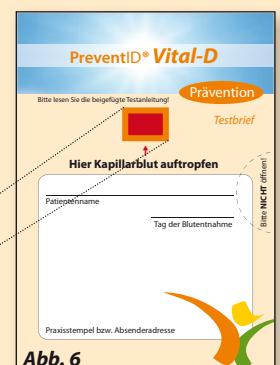
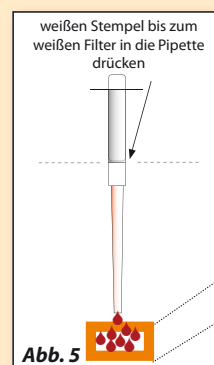
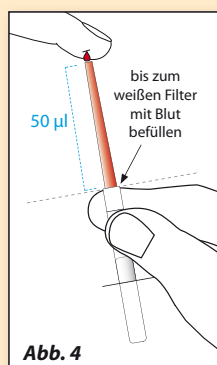


Testanleitung

Entnahme von Kapillarblut für die Bestimmung des 25-OH Vitamin D Status

Durchführung:

- Beschriften Sie den Testbrief auf der Vorderseite in Druckschrift mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse bzw. dem Praxisnamen.
- Entnahme des Kapillarbluts:
 - Waschen Sie sich die Hände mit Seife und warmen Wasser, trocknen Sie sich die Hände mit einem sauberen und trockenen Handtuch ab.
 - Lanzette/Stechhilfe und Kunststoff-Pipette der Tüte entnehmen und bereit legen. Die Kunststoff-Pipette befindet sich in gebrauchsfertigem Zustand – **der weiße Stempel der Pipette soll in der gelieferten Originalposition bleiben, da sonst die korrekte Aufnahme von 50 µl Kapillarblut nicht gewährleistet ist** (s. Abb. 3)!
 - Lanzette/Stechhilfe vorbereiten: Drehen Sie den gelben Schutzstift ab und entfernen Sie ihn (Abb. 1).
 - Massieren Sie die Fingerbeere/Fingerkuppe und desinfizieren Sie sie mit dem alkoholgetränkten Tupfer. Warten Sie ab, bis der Finger trocken ist; halten Sie nun die Lanzette/Stechhilfe mit der von dem Stift gelösten Seite seitlich an die Fingerbeere/Fingerkuppe und drücken Sie oben fest auf den gelben Auslöseknopf (Abb. 2). Wischen Sie den ersten Blutropfen mit einem sauberen Tuch weg. Drücken Sie den Finger sanft in Richtung Punktionsstelle und halten Sie die Hand nach unten um den Kapillarblutfluss zu erleichtern.
 - Anschließend führen Sie die Spitze der Kunststoff-Pipette an den Blutropfen, bis sie komplett bis zum weißen Filter mit Kapillarblut befüllt ist (Abb. 4). Dieses Volumen entspricht **50 µl** Kapillarblut. Bei diesem Vorgang die Kunststoff-Pipette senkrecht halten, der weiße Stempel zeigt in Richtung Boden.

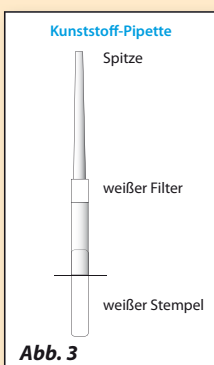

- Durch komplettes Durchdrücken des weißen Stempels bis zum weißen Filter wird danach das **gesamte** Kapillarblut (50 µl) auf das dafür vorgesehene Auftragfenster des Testbriefes **PreventID® Vital-D** getropft (Abb. 5 und Abb. 6).
 - Nach Gebrauch die Lanzette/Stechhilfe und die Kunststoff-Pipette entsorgen.
- Lassen Sie den Testbrief mindestens 30 Minuten an der Luft trocknen und geben Sie diesen anschließend in den mitgelieferten Druckverschlussbeutel.
 - Senden Sie den Testbrief im beigelegten Rückumschlag möglichst innerhalb von 3 Tagen an das Labor zurück.

Die Auswertung des **PreventID® Vital-D** erfolgt mit der speziell für Trockenblut modifizierten ELISA-Diagnostik von Immundiagnostik. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit anderweitig ermittelter Ergebnisse.

Verwendete grafische Symbole:

	Temperaturbegrenzung		Hersteller
	In-Vitro-Diagnostikum		Chargennummer
	Bestellnummer		Verwendbar bis
	Gebrauchsanweisung beachten		Nicht zur Wiederverwendung
	Inhalt ausreichend für <n> Prüfungen		

Vertrieb durch:
Preventis GmbH
 Wiesenstr. 4, 64625 Bensheim
 Germany
 www.preventis-online.de
 info@preventis-online.de

